


# Mandatorische Ventilation


Das Beatmungsgerät  
übernimmt die Atemarbeit.

# Mandatorische Ventilation

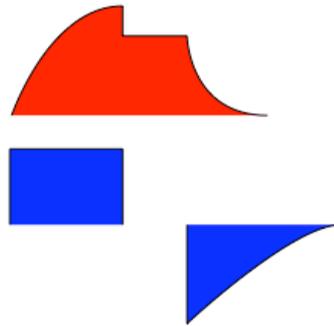


|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Volumen   | Flow  | Frequenz   | Inspirationszeit  |
| 1000 ML   | 60 LPM  | 10 BPM   | 2 SEC   |
| Flowförderungszeit: 1 SEC   |   |  |   |
| Plateauzeit: 1 SEC  |   |  |   |
| Expirationszeit: 4 SEC  |   |  |   |
| Zykluszeit: 6 SEC   |   |  |   |

# Mandatorische Ventilation

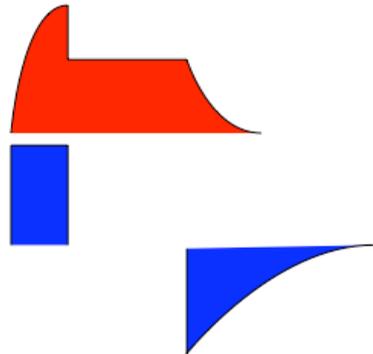


|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|                   |  |  |  |
| Volumen  | Flow  | Frequenz   | Inspirationszeit  |
| 1000 ML  | 120 LPM   | 10 BPM   | 2 SEC   |
| Flowförderungszeit: 0,5 SEC<br>Plateauzeit: 1,5 SEC<br>Expirationszeit: 4 SEC<br>Zykluszeit: 6 SEC |   |  |   |

# Mandatorische Ventilation

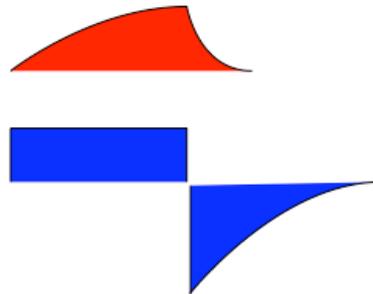

|  |        |          |                  |
|--|--------|----------|------------------|
|  |        |          |                  |
| Volumen  | Flow   | Frequenz | Inspirationszeit |
| 1000 ML  | 30 LPM | 10 BPM   | 2 SEC            |
| Flowförderungszeit: 2 SEC<br>Plateauzeit: 0 SEC<br>Expirationszeit: 4 SEC<br>Zykluszeit: 6 SEC |        |          |                  |

# Mandatorische Ventilation

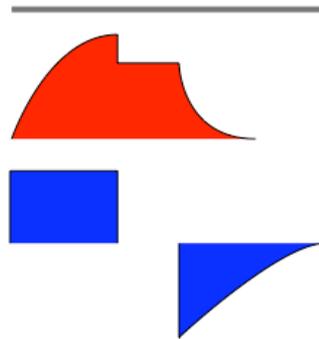


The control panel includes five dials for setting parameters:

- Volumen: 1000 ML
- Flow: 60 LPM
- Frequenz: 10 BPM
- Inspirationszeit: 2 SEC
- Inspirationsdruck: 50 MBAR

The display box shows the following timing parameters:

- Flowförderungszeit: 1 SEC
- Plateauzeit: 1 SEC
- Expirationszeit: 4 SEC
- Zykluszeit: 6 SEC

# Mandatorische Ventilation

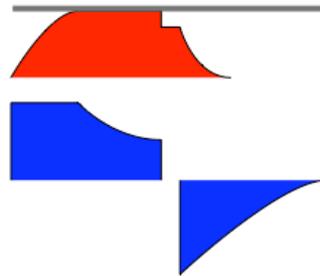

Control panel for mandatory ventilation with the following settings:


| Parameter         | Value   |
|-------------------|---------|
| Volumen           | 1000 ML |
| Flow              | 60 LPM  |
| Frequenz          | 10 BPM  |
| Inspirationszeit  | 2 SEC   |
| Inspirationsdruck | 25 MBAR |

Derived parameters:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Flowförderungszeit | 1,8 SEC |
| Plateauzeit        | 0,2 SEC |
| Expirationszeit    | 4 SEC   |
| Zykluszeit         | 6 SEC   |

**Drucklimitiert**

# Mandatorische Ventilation

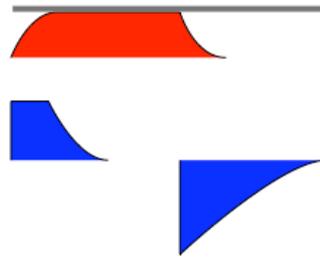

The control panel features five rotary dials for setting parameters: Volumen (1000 ML), Flow (60 LPM), Frequenz (10 BPM), Inspirationszeit (2 SEC), and Inspirationsdruck (15 MBAR). A central display shows the following settings:

- Flowförderungszeit: ... SEC
- Plateauzeit: ... SEC
- Expirationszeit: 4 SEC
- Zykluszeit: 6 SEC

**Druckkontrolliert - Volumeninkonstant**